

- 1 Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%". Para conferir se a impressão está correta, verifique se o quadrado mede 2,5cm

2,5 cm


- 2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.

- 3 Mantenha o medidor na posição horizontal, e experimente cada tamanho para definir o mais adequado.



Verifique na imagem que o paciente usa o tamanho Média (M).

Corte ao longo da linha pontilhada

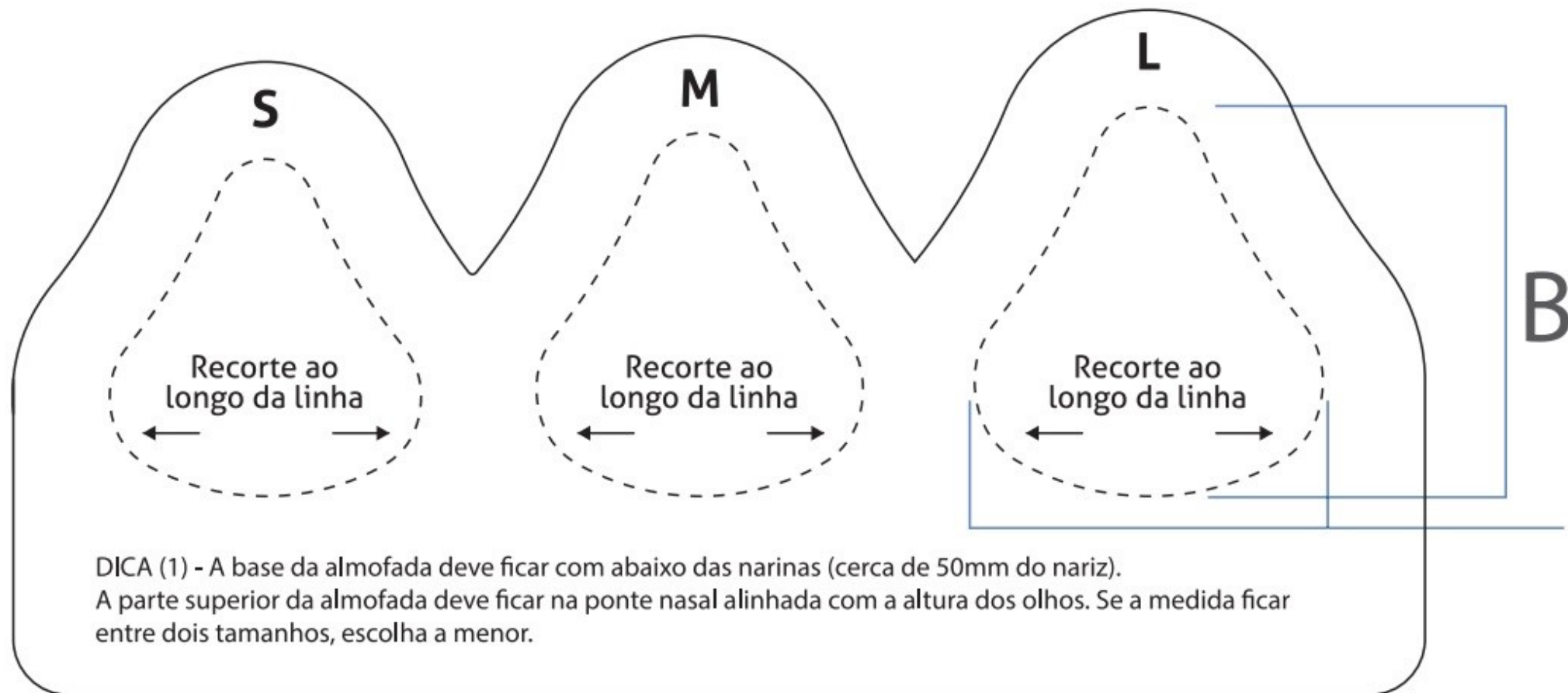

DICA (1) - A base da almofada deve ficar com abaixo das narinas (cerca de 50mm do nariz). A parte superior da almofada deve ficar na ponte nasal alinhada com a altura dos olhos. Se a medida ficar entre dois tamanhos, escolha a menor.